



راهنمای استفاده از دستگاه

مشخصات دستگاه :

نام دستگاه: ونتیلاتور همیلتون

مدل: Raphael XTC

ساخت: آلمان

تاریخ راه اندازی: ۸۶/۱۲/۲۰

شرکت پشتیبان: Advance

شرایط نگهداری:

دما: ۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد

رطوبت: ۰-۹۰ درصد

فشار اتمسفر: ۶۰۰-۱۱۰۰ میلی بار

برق مصرفی: ۱۰۰ تا ۱۲۵ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز

نحوه شست و شو :

✓ کلیه اجزاء دستگاه: اتوکلاو (دما ۱۲۱ درجه سانتی گراد-زمان ۲۰ دقیقه) یا محلول

ضد عفونی کننده ۲ درصد - زمان ۲۰ دقیقه

✓ فلوسنسور: محلول ضد عفونی کننده ۲ درصد - زمان ۲۰ دقیقه

راهنمای کلیدها :



- ۱-۱- کلید جانبی مشاهده پنجره اطلاعات عددی بیمار
- ۲-۱- کلید جانبی پنجره انتخاب شکل نمودارها
- ۳-۱- کلید جانبی پنجره ست دستگاه
- ۴-۱- کلید جانبی پنجره مدها
- ۵-۱- کلید جانبی پنجره کنترل (تنظیم پارامترها)
- ۶-۱- کلید جانبی پنجره آلارم

- ۱-۲- کلید قطع آلارم
- ۲-۲- کلید اکسیژن ۱۰۰٪
- ۳-۲- کلید نگهداشتن دم / تنفس دستی
- ۴-۲- کلید نبولایزر
- ۵-۲- کلید Stand by
- ۶-۲- نشانگر وجود حساسه (Trigger)
- ۷-۲- نشانگر اتصال به برق
- ۸-۲- کلید چرخان انتخاب و تغییر در منوها

- ۱-۳- کانکشن خروجی نبولایزر
- ۲-۳- کانکشن فلوسنسور
- ۳-۳- نشانگر مسیر از طرف بیمار
- ۴-۳- پوشش دریچه بازدمی
- ۵-۳- خروجی مسیر
- ۶-۳- O2 Cell Sensor
- ۷-۳- فیلتر دم
- ۸-۳- نشانگر مسیر به طرف بیمار

تصویب کننده نهائی :
Approved by :
دکتر حسن یاری

کنترل کننده :
Controlled by :
حسین مصطفوی

تهیه کننده :
Originated by :
اکرم میثاقي _ فرناز
فرهادي