



**مشخصات دستگاه :**

نام دستگاه : الکتروشوک

مارک : ZOLL


مدل : M Series

شرکت پشتیبان : جهان گسترش تجارت

**شرایط نگهداری :**

نحوه شست و شو :

از پنبه آغشته به الکل سفید یا محلول آب و صابون استفاده کنید.  
پس از استفاده ژل روی سطح پدالها را کاملاً با الکل تمیز کنید.

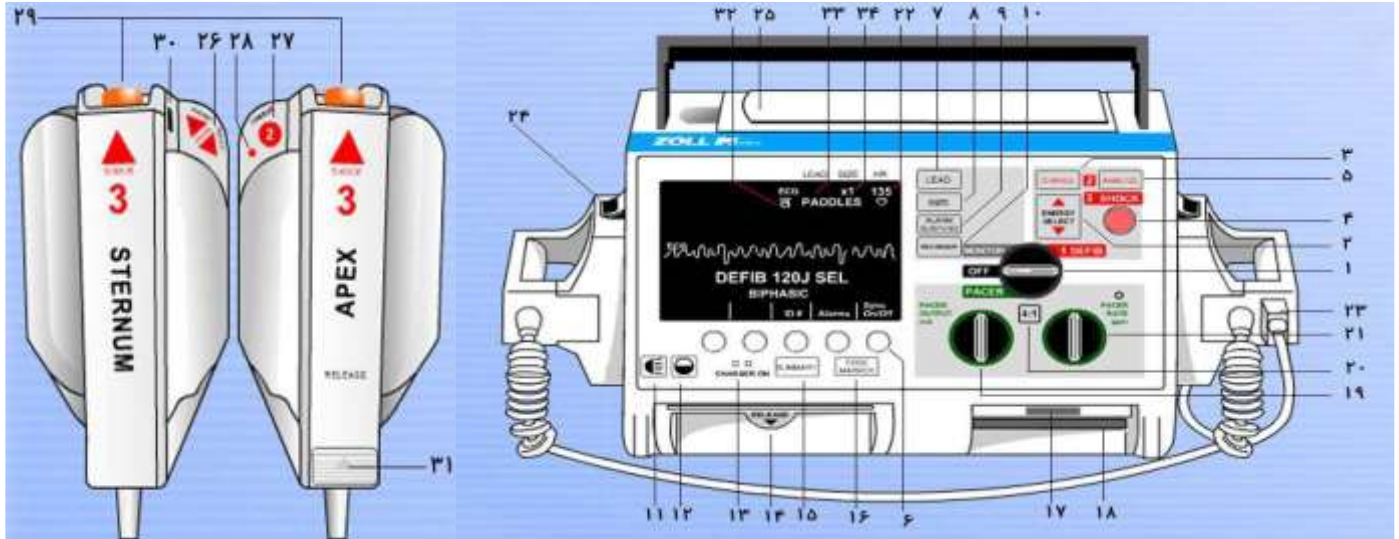

**راهنمای کلیدها :**

۱. سوییچ انتخاب مد
۲. کلیدهای انتخاب انرژی
۳. کلید شارژ انرژی
۴. کلید تخلیه انرژی
۵. کلید آنالیز ECG بیمار
۶. کلید فعال/ غیرفعال کردن سنکرون
۷. کلید انتخاب لید ECG (محل ۳۳ روی صفحه نمایش)
۸. کلید انتخاب سایز نمایش ECG (محل ۳۴ روی صفحه نمایش)
۹. کلید قطع آلارم (محل ۳۲ روی صفحه نمایش)
۱۰. کلید پرینتر
۱۱. کلید صدای آلارم
۱۲. کلید شدت نور صفحه نمایش
۱۳. نشانگرهای وضعیت برق و باتری
۱۴. محل قرار گیری کاغذ
۱۵. کلید گرفتن گزارش
۱۶. کلید Code marker
۱۷. درگاه قرارگیری کارت PC مودم
۱۸. درگاه قرارگیری کارت حافظه PCMCIA
۱۹. تنظیم خروجی میزان ضربان پیس میکر
۲۰. کلید 4:1
۲۱. تنظیم خروجی نرخ ضربان بیمار
۲۲. محل نمایش نرخ ضربان قلب بیمار
۲۳. محل اتصال کابل MFC به پدال Apex
۲۴. ضامن آزاد کننده پدالها
۲۵. باتری دستگاه
۲۶. کلیدهای انتخاب انرژی
۲۷. کلید شارژ انرژی
۲۸. چراغ نشانگر شارژ
۲۹. کلیدهای تخلیه انرژی
۳۰. کلید پرینتر
۳۱. ضامن کابل MFC

Approved by:

تصویب کننده نهایی :

کنترل کننده :

تهیه کننده :