



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی

In/126/ME

کد

۹۴/۱/۲۸

صفحه ۲ از ۲

راهنمای استفاده از دستگاه

مراحل بکارگیری دستگاه :

• تست دستگاه:

۱. دستگاه را در مد شوک قرار دهید.
۲. سطح انرژی ۳۰ ژول را انتخاب کنید.
۳. کلید شارژ را فشار دهید.
۴. همزمان دو کلید نارنجی رنگ روی پدالها را جهت تخلیه شوک فشار دهید.
۵. در صورت عملکرد صحیح دستگاه ظهور پیام TEST OK را روی صفحه نمایش نشان می دهد.

• مانیتورینگ ECG:

۱. دستگاه را مد Monitor قرار دهید.
۲. ECG بیمار و پارامترهای ضربان قلب میانگین ، لید انتخاب شده ، ساین ECG و فعال و غیر فعال بودن آلارم دستگاه به مدت ۴ ثانیه در صفحه نمایش قابل مشاهده است.

• دفیبریلاسیون دستی با استفاده از پدالها:

۱. انتخاب انرژی:
 - دستگاه را مد DEFIB قرار دهید .
 - سطح انرژی را با استفاده از کلیدهای انتخاب انرژی روی پانل دستگاه یا پدال استرنوم انتخاب کنید.
 - پدال ها را به ژل آغشته کنید.
۲. شارژ انرژی:
 - کلید شارژ روی پانل دستگاه یا روی پدال Apex را انتخاب کنید.
۳. تحویل شوک به بیمار:
 - هر یک از پدالها را در موقعیت خود روی سینه بیمار قرار دهید.
 - فشاری معادل ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم روی پدالها وارد کنید.
 - همزمان دو کلید تخلیه انرژی روی پدالها را فشار دهید.

نکته مهم:

- در هنگام تخلیه شوک روی بدن بیمار دقت کنید که هیچ تماسی بین بیمار، تخت و تجهیزات متصل به بیمار با اطرافیان و کاربر وجود نداشته باشد. همچنین بین بیمار و قسمت‌های فلزی تخت اتصال نباشد.
- برای بیماران دارای شکستگی قفسه سینه از پد بیس استفاده کنید.

تهیه کننده :

Originated by :

کنترل کننده :

Controlled by :

تصویب کننده نهائی :

Approved by :

مهر و امضاء دفتر مدیریت کیفیت QMS

هرگونه تکثیر و کپی از این سند تنها از طریق دفتر مدیریت کیفیت مرکز امکان پذیر است